



Instrukcja użytkowania / Instructions for use

<p>Kaniule do aplikacji wypełnień dermatologicznych. Wyrób do użycia wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.</p>	<p>Cannulae for the application of dermal fillers Product must only be used by professionally educated staff.</p>
<p>Instrukcja użytkowania Zdezynfekować skórę w miejscu nakłucia. Wykonać nakłucie ostrą igłą tego samego lub większego rozmiaru i niezwłocznie wyjąć ostrą igłę z zachowaniem należytej ostrożności, tak by nikogo przypadkowo nie skaleczyć. Określić miejsce nakłucia na podstawie małej kropli krwi widocznej po usunięciu igły. Wprowadzić kaniulę do skóry głębokiej lub warstwy podskórnej w zależności od rozmiaru kaniuli i rodzaju wypełnienia. Wprowadzić kaniulę równoległe do powierzchni skóry. Wykorzystać elastyczność kaniuli aby wprowadzać ją do skóry w różnych kierunkach na pożądaną głębokość. Aplikować preparat wycofując igłę owiewając miejsce aplikacji chłodnym powietrzem. Powtarzać to samo wprowadzając kaniulę pod różnymi kątami i w różnych kierunkach aż do osiągnięcia zamierzonego efektu. Wprowadzić kaniulę ze skóry delikatnie. Po użyciu pozbyć się zarówno kaniuli jak i ostrej igły w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.</p>	<p>Instructions for use. Disinfect the skin at the area of treatment. Make the initial skin puncture with a sharp needle of the same gauge or bigger & immediately discard the sharp needle very carefully to avoid pricking anyone accidentally. Spot the entry point that's made visible by the tiny blood drop created by the puncture. Insert the blunt tip cannula into the deep dermis or sub-q layer, depending on the cannula gauge and the filler that is injected. Penetration must be performed perpendicularly to the surface of the skin. Use the flexibility of the microcannula to guide it into the skin tangentially to the length desired. Inject in a retrograde fashion, fanning the treatment area. Keep doing this in different planes and towards different directions if needed until you achieve the volumizing effect and skin stimulation desired. Remove the microcannula from the skin carefully . After use dispose of the sharp needle and the cannula in a suitable container which conforms to regulations.</p>
<p>Ostrzeżenia Nie używać, jeśli opakowanie jednostkowe jest uszkodzone. Produkt jednorazowego użytku - może być użyty tylko raz i nie może być ponownie sterylizowany. Kaniule winny być przechowywane w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Zaleca się używać kaniule w połączeniu ze strzykawkami luer-lock</p>	<p>Caution Do not use if the unit package is damaged. This is a single-use product to be used once and cannot be resterilized. Cannulae should be stored at room temperature, away from sources of direct heat and damp places. It is recommended to use cannulas in connection with luer-lock syringes.</p>

Wytwórca: **Medical Brokers Adam Cieślak sp. j.**
Ul. Lipowa 1
95-100 Zgierz, Polska

CE 2274

Opracował: Maciej Małecki

Zatwierdził: Adam Cieślak