

Instrukcja użycia pędzelka do wybielania zębów WHITEsmile Whitening Pen

Pędzelek wybielający firmy WHITEsmile jest nowoczesną i prostą metodą domowego wybielania zębów. Szczególnie rozwinięta formuła z nadtlenkiem karbamidu i nadboranem sodu o wysokiej lepkości są podstawą wysokiej efektywności i przyjaznego zastosowania. Nadwrażliwość jest zminimalizowana. Celem uzyskania szerszych informacji na temat profesjonalnego wybielania zajrzyj na stronę www.whitesmile.com.

Zastosowanie

Pędzelek wybielający zarówno do zębów żywych jak i martwych do bezpośredniego zastosowania na powierzchni zębów. Preparat nie wybiela wypełnień korony zębów, sztucznych koron i implantów.

Instrukcja użycia: jak osiągnąć maksymalny efekt.

- Wyszczotkuj i umyj zęby;
- Zdejmij osłonkę pędzelka i zacznij powoli przekreślać tył pędzelka, aby żel wybielający przeniknął na końcówkę pędzelka;
- Aplikuj żel pędzelkiem, nakładając na powierzchnię zębów cienką warstwę żelu. Unikaj kontaktu żelu z dziąsłami i innymi miękkimi tkankami;
- Pozostaw żel na powierzchni zębów przez 20 minut. Przepłucz usta ciepłą wodą i wyszczotkuj ponownie zęby.
- Powstrzymaj się od palenia papierosów przez 30 minut od zabiegu;
- Celem osiągnięcia lepszych rezultatów ogranicz spożycie herbaty, kawy, czerwonego wina, ogranicz palenie papierosów przez co najmniej 2 godziny od wybielania.

Wskazówka: celem utrzymania efektu wybielania stosuj codziennie pastę wybielającą WHITEsmile.

Możliwe efekty uboczne:

Nadwrażliwość zębów, podrażnienie dziąseł. Negatywne objawy są przejściowe i mogą utrzymywać się przez dobę od zakończenia wybielania.

Ostrzeżenia:

Unikać bezpośredniego kontaktu z jamą ustną, oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą, należy spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. Pędzelek wybielający nie jest zalecany w okresie ciąży, karmienia piersią i dla osób w wieku poniżej 16 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Składniki: gliceryna, woda destylowana, nadtlenek karbamidu, karbomer, nadboran sodu, sacharynian sodu, trometamina, kwas wersenowy, aromat.

Produkt zgodny z Dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC.

Data przydatności do użycia oraz numer serii umieszczony bezpośrednio na wyrobie oraz na opakowaniu handlowym.

Wytwórca:

WHITEsmile GmbH, Weinheimer Strasse 6, 69-488 Birkenau, Niemcy

e-mail: info@whitesmile.de

www.whitesmile.de

Data wydania instrukcji: **07.09.2011 r.**

